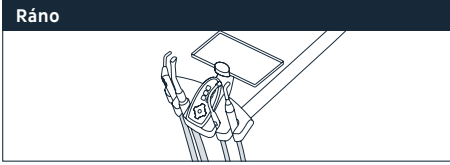

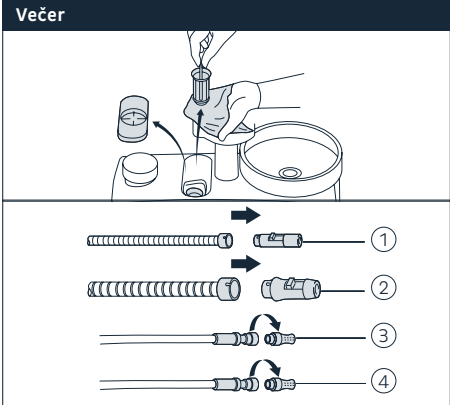

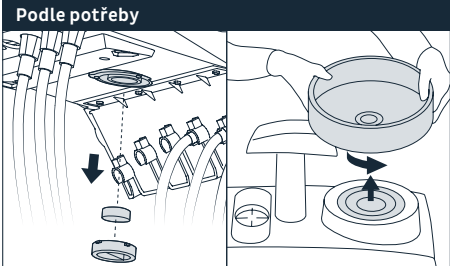


# Plán ošetření a čištění zařízení

## KaVo ESTETICA™ E30.

Kdy?	Co?	Jak?
<b>Ráno</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propláchnutí (vnitřku) hadic nástrojů a vodovodních systémů</li> <li>• Propláchnutí (vnitřku) odsávacích hadic, systému odsávání a plivátka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Proplachujte po dobu 2 minut na všech odběrných místech</li> <li>▸ Odsávání studené vody odsavačem jemné mlhy a malou savkou z pohárku</li> </ul>
<b>Po každém ošetření</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propláchnutí (vnitřku) hadic nástrojů a vodovodních systémů</li> <li>• Propláchnutí (vnitřku) odsávacích hadic, systému odsávání a plivátka</li> <li>• Čištění a dezinfekce               <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsávací hadice (vnější povrch) a hadic nástrojů (vnější povrch)</li> <li>- plivátka a kryt sítka</li> <li>- povrchy přístrojů, podušek a světel</li> </ul> </li> <li>• Čištění a dezinfekce rukojetí na lékařských prvcích a světla používaného při ošetření</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Proplachujte po dobu 20 sekund na všech odběrných místech</li> <li>▸ Odsávání studené vody odsavačem jemné mlhy a malou savkou z pohárku. V případě potřeby dezinfekce: odsajte dávku přípravku DEKASEPTOL Gel z dávkovače</li> <li>▸ Ruční čištění a dezinfekce setřením</li> <li>▸ Porcelánové plivátko lze sejmout a lze ho dezinfikovat teplem</li> <li>▸ Bílé rukojeti lze sejmout a dezinfikovat je setřením</li> <li>▸ Šedé rukojeti lze sejmout, a lze je dezinfikovat teplem a sterilizovat</li> </ul>
<b>Večer</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propláchnutí (vnitřku) hadic nástrojů a vodovodních systémů</li> <li>• Kontrola vložek sítka</li> <li>• Čištění a dezinfekce               <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsávacích hadic (vnitřku)</li> <li>- systému odsávání</li> <li>- plivátka</li> </ul> </li> <li>• Čištění a dezinfekce odsávacích hadic (vnější povrch) a hadic nástrojů (vnější povrch)</li> <li>• Čištění a dezinfekce přípojovacích kusů odsávacích hadic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Proplachujte po dobu 20 sekund na všech odběrných místech</li> <li>▸ Kontrola filtrů a v případě potřeby výměna filtrů</li> <li>▸ Odsávání studené vody odsavačem jemné mlhy a malou savkou z pohárku. Odsajte dávku přípravku DEKASEPTOL Gel pomocí odsavače jemné mlhy a malé savky, znovu odsajte studenou vodu, poté odsajte další dávku přípravku DEKASEPTOL Gel, odsavač jemné mlhy a malou savku opět odložte</li> <li>▸ Do plivátka dejte dávku přípravku DEKASEPTOL Gel a plivátko vyčistěte kartáčem</li> <li>▸ Přípojovací kusy lze sejmout a lze je dezinfikovat teplem</li> <li>▸ Sejmout přípojovací kusy 1 a 2 a provést termodezinfekci, 3 a 4 dezinfikovat setřením</li> </ul>
<b>Týdně a po delším nepoužívání</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čištění:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- hadic nástrojů (vnitřek)</li> <li>- vodovodních systémů</li> </ul> </li> <li>• Čištění a dezinfekce               <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsávacích hadic</li> <li>- systému odsávání</li> <li>- plivátka</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Proveďte intenzivní dekontaminaci</li> <li>▸ Odsávání studené vody odsavačem jemné mlhy a malou savkou z pohárku. Odsajte dávku přípravku DEKASEPTOL Gel pomocí odsavače jemné mlhy a malé savky, znovu odsajte studenou vodu, poté odsajte další dávku přípravku DEKASEPTOL Gel, odsavač jemné mlhy a malou savku opět odložte</li> <li>▸ Do plivátka dejte dávku přípravku DEKASEPTOL Gel a plivátko vyčistěte kartáčem</li> </ul>
<b>Podle potřeby</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrola filtru zpětného vzduchu turbíny</li> <li>• Silikonové odkládací plochy</li> <li>• Plnění pohárku a podložka pohárku</li> <li>• Držák zubářských nástrojů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Kontrola filtru a v případě potřeby jeho výměna</li> <li>▸ Silikonové odkládací plochy jsou snímací a lze je sterilizovat</li> <li>▸ Plnění pohárku lze sejmout a lze ho dezinfikovat teplem</li> <li>▸ Plnění pohárku lze sejmout a dezinfikovat setřením</li> <li>▸ Ruční čištění a dezinfekce setřením</li> <li>▸ Držáky nástrojů lze sejmout</li> </ul>



**Používejte pouze dezinfekční prostředky schválené společností KaVo!**  
 Program péče a čištění obsahuje výhradně podstatné funkce obsluhy. Nenahrazuje návod k použití ani pokyny péči. Ty je bezpodmínečně třeba dodržovat, aby bylo zabráněno poruchám a škodám.

#### Povolené dezinfekční prostředky:

- CaviWipes,
- CaviCide (Metrex)
- MikroZid Liquid (Schülke & Mayr)
- FD 322 (Dürr)
- Incidin Liquid (Ecolab)